

**Bijlagen:**  
Aquatec Ocean douche- en toiletstoelen  
Alber hulpaandrijvingen

# Invacare® | **Zorgbulletin**

jaargang 4, nummer 6 - oktober 2014

## In deze uitgave

- De Wulverhorst is klaar voor de toekomst
- Nieuwe hoepelondersteuning Alber twion
- Aquatec Ocean E-VIP: gekanteld extreem stabiel
- Voordelen van tillen met lussen
- Zuurstoftherapie: levering én dienstverlening
- Invacare in het land!



**Yes, you can.®**



# Voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij u wederom het Invacare Zorgbulletin. Een bulletin waarin uitdagingen bij praktijksituaties in de zorg worden gekoppeld aan oplossingen.


In dit Zorgbulletin vertellen wij bijvoorbeeld over het keuzeproces voor de plaatsing van bedden en matrassen in de onlangs geopende zorginstelling "De Wulverhorst". Verder wordt het onderwerp ruimtelijk tillen uitgediept. In de zuurstof column komt deze keer een distributeur aan het woord.

In deze uitgave zetten wij verder de specifieke kenmerken van de Ocean E-Vip, onderdeel van de Aquatec Ocean douchestoelen range, voor u op een rijtje. De nadruk ligt hierbij op belangrijke onderwerpen voor instellingen, te weten: zitten & positioneren en ergonomie. Een overzicht van de complete Ocean range vindt u in de bij dit bulletin gevoegde brochure.

De extra, uitneembare bijlage in dit Zorgbulletin geeft u een handig overzicht van onze Alber elektrische hulp-aandrijvingen. De e-motion, de e-fix en de viamobil komen hierbij allemaal aan bod. Behoud van zelfstandigheid en minder belasting van de cliënt en de verzorger/begeleider zijn hierbij de speerpunten.

Op de achterzijde van dit bulletin vindt u tenslotte een overzicht van de evenementen waar wij de komende tijd aanwezig zullen zijn. U bent van harte welkom op onze stand om u te laten informeren!

Wilt u buiten deze mogelijke contactmomenten om meer weten over één van de onderwerpen uit dit bulletin, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande telefoonnummers. Wij helpen u graag!

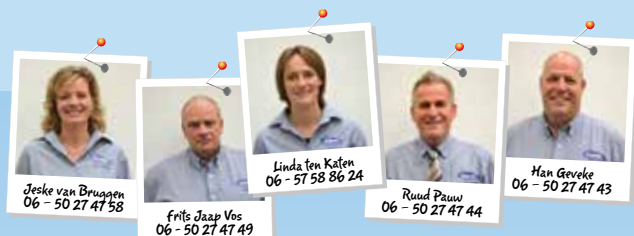

PS: Wij vragen uw aandacht voor de Reach and RoHS. Dit zijn Europese regels met betrekking op de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en op de productie en het gebruik van chemische substanties, en hun potentiële impact op zowel de volksgezondheid en het milieu. Deze regels zijn vanaf 22 juli jl. van kracht en Invacare voldoet 100% aan deze richtlijn. Ook meer informatie hierover kunt u krijgen via onze account managers.

# De Wulverhorst

Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst te Oudewater heeft zeer recent de nieuwbouw kunnen betrekken. In de nieuwbouw heeft iedere bewoner een eigen appartement waarbinnen de benodigde zorg geboden wordt. Daarnaast vervult De Wulverhorst ook in de behoefte van verpleeghuiszorg. Zo zijn er prachtige kleinschalige woonvormen voor de psychogeriatrische bewoner. De Wulverhorst is voor de verpleeghuisbewoners verantwoordelijk voor het plaatsen van meubilair zoals verpleegbedden, nachtkastjes en matrassen.

## Voor iedere zorgvraag een passend bed

De Wulverhorst heeft op zeer professionele wijze de markt voor verpleegbedden verkend. Na het bezoeken van diverse leveranciers, het afwegen van de verschillende wensen en eisen hebben zij in eerste instantie een aantal Invacare bedden op proef geplaatst, die er nu vast staan. Alle betrokken partijen hebben meegedacht: van de Raad van Bestuur, de architect, de zorg en zeker ook de cliëntenraad hadden een belangrijke stem.

De Wulverhorst heeft gekozen voor een specifiek bed per doelgroep. Voor de meeste bewoners is het Alegio NG verpleegbed ideaal. De Alegio NG is een extra laag bed met daarbij een groot hoogtebereik. Gecombineerd met uitrolmatrassen een prima combinatie om de gevolgen van valincidenten te beperken. Het inlegdraad heeft alle gebruikelijke instelmogelijkheden waaronder de fowlerpositie, knieverstelling, manuele onderbeenverstelling en rugverstelling.

Voor de groep bewoners waarbij de zorgafhankelijkheid groter is, is gekozen voor een bed met nog meer mogelijkheden: het SB 755. Dit bed is eenvoudig te verlengen en heeft een hoge belastbaarheid (200 kg cliëntgewicht).



# is klaar voor de toekomst



*Van links naar rechts, van boven naar onder: Uitleg over de Softform matrassen, Het nieuwe pand van De Wulverhorst in Oudewater, Uitleg over de functionaliteit van de bedden, Les met High Tea tussen de steigers.*



Ook heeft dit bed specifieke behandelvoordelen:

- Door het vrijleggen van de hielen met de elektrisch verstelbare onderbeenverstelling is er sprake van decubitus preventie.
- Door een uniek ontworpen virtueel draaipunt, met "green button", worden schuifkrachten voorkomen. Met deze "green button" worden de rug- en knieverstelling gelijktijdig geactiveerd.
- Voor het bevorderen van de veneuze terugstroom worden met de elektrische onderbeenverstelling de benen hoog gelegd. Andersom kan juist een zitstoelpositie gecreëerd worden.

## Decubitus preventie

De Wulverhorst heeft ervoor gekozen op alle bedden preventieve antidecubitusmatrassen te leggen. De Softform matrassen van Invacare zijn gekozen vanwege de combinatie van klinische onderbouwing, ligcomfort en grote praktische voordelen, daarbij rekening houdend met het ligcomfort, de effectiviteit en de verplaatsbaarheid van de cliënt in de bedomgeving. Er is bewezen dat met de inzet van preventieve matrassen decubitus tot wel 90% gereduceerd kan worden.

Voor de groep bewoners waarbij de zorgvraag intensiever is, is gekozen voor matrassen met een dubbele functionaliteit "de Softform Premier Active". Op het moment dat een bewoner ondanks alle preventieve maatregelen toch decubitus ontwikkelt, kan er een pomp aan de matras gekoppeld worden. Hierdoor wordt de matras een "bewezen" dynamisch antidecubitusmatras. Dit zorgt voor een zeer snelle inzet tot de juiste behandeling. Logistieke processen worden tot een minimum beperkt. Dit voorkomt hoge additionele huurkosten van dynamische matrassen.

## Feestelijke ingebruikname

Terwijl de laatste bouwwerkzaamheden nog werden uitgevoerd is op feestelijke wijze, onder het genot van een High Tea, een klinische les gegeven aan het personeel van De Wulverhorst. Terwijl de steigers nog volop in gebruik waren werd er tegelijkertijd uitleg gegeven over het gebruik van de bedden en de matrassen. Vlak daarna heeft de verhuizing plaatsgevonden. De Wulverhorst is klaar voor de toekomst!



# Alber nieuws

## Alber bijlage

In dit Zorgbulletin is een bijlage "Voordelen van gebruik van Alber hulpaandrijvingen in AWBZ instellingen" bijgesloten. Dit handige overzicht geeft inzicht in de toepasbaarheid in uw dagelijkse praktijk van de elektrische Alber hulpaandrijvingen, of het nu gaat om de hoepelondersteuning e-motion M15, de hulpaandrijving e-fix E25/E26 of de duw- en remondersteuning viamobil V25.

Aan de hand van probleemschetsen wordt inzichtelijk gemaakt welke Alber-oplossing kan bijdragen aan verlichting van de zorgvragen waarmee uw instelling geconfronteerd wordt, alsook aan de mobiliteitsbehoefte van uw cliënten.



## Nieuwe hoepelondersteuning Alber twion

Naast de in de bijlage genoemde aandrijvingen vinden wij het belangrijk om u, onze relaties in de AWBZ, te informeren over het feit dat er een nieuwe hoepelondersteuning is. Deze hebben wij dit jaar op de Supportbeurs geïntroduceerd. Het gaat hier om de nieuwste telg van de Alber familie: de Alber twion M24 hoepelondersteuning.

Deze hoepelondersteuning ontlast de schouders en spieren en is geschikt voor het vergroten van de actieradius en mobiliteit. De kenmerken van de Alber twion in het kort:

- **Lichtgewicht: vanaf slechts 6 kg per wiel**
- **Snelheden van max. 10 km/u**
- **Mobility-Plus-Pakket: biedt rij informatie en maakt de twion op afstand bestuurbaar**
- **Voor actieve eindgebruikers**

Wilt u meer weten over de twion, neem dan contact op met één van onze accountmanagers voor een demo:

- Jeske van Bruggen (06 - 50 27 47 58  
of via [jvbruggen@invacare.com](mailto:jvbruggen@invacare.com))
- Frits Jaap Vos (06 - 50 27 47 49  
of via [fjvos@invacare.com](mailto:fjvos@invacare.com)).
- Han Geveke (06 - 50 27 47 43  
of via [hgeveke@invacare.com](mailto:hgeveke@invacare.com)).



twion®

# Aquatec Ocean Range zeer veelzijdig

*Bijlage:  
Aquatec Ocean range -  
overzicht van de mogelijkheden  
en voordelen*

## Aquatec Ocean E-VIP: gekanteld extreem stabiel

Deze douchestoel biedt een uitstekende lichaamsondersteuning voor cliënten met complexe situaties die nog toegang wensen tot douche faciliteiten en een darm routine hebben. Cliënten met progressieve ziekten zouden kunnen ook profiteren van de mogelijkheid accessoires toe te voegen aan de stoel en zo de juiste ondersteuning te krijgen als hun toestand verandert.

De E-VIP biedt volop mogelijkheden voor individuele aanpassingen van afzonderlijke delen, zoals de rugleuning, de armleuningen en de voetsteunen.

De kantelfunctie maakt het mogelijk om cliënten met een slechte rompcontrole veilig te plaatsen en door het toepassen van een in hoogte en diepte verstelbare hoofdsteun krijgen cliënten met verminderde kracht in de nek toch de juiste ondersteuning.

Het gebruik van de kantelfunctie bij het tillen van een cliënt in de stoel maakt het verzorgers mogelijk om een cliënt goed te positioneren en het comfort en de veiligheid te verhogen, met oog voor de eigen ergonomische werkhouding. De opklapbare armsteun geeft een goede toegang tot de cliënt en zorgt ervoor dat verzorgers volledig kunnen helpen met persoonlijke verzorgings-taken. **Het onderstel is zeer stabiel en geeft verzorgers vertrouwen dat zelfs wanneer maximaal gekanteld wordt en de maximale zithoogte wordt benut, de douchestoel zeer stabiel blijft.** Ideaal voor cliënten met een spasme van het bovenlichaam.



## Kenmerken Aquatec Ocean E-VIP

De Aquatec Ocean E-VIP is een **elektrisch in hoogte verstelbare douchestoel** die bestaat uit een zittings- en rugleuningsunit, gemonteerd op een in hoogte verstelbaar onderstel met vier wielen.

De hoogteverstelling wordt gerealiseerd door twee accu-aangedreven motoren, geplaatst aan beide zijden van het chassis. Dankzij de ruimte tussen de buizen van het chassis, is de stoel eenvoudig over het toilet te plaatsen. Alle gebruikte materialen zijn vervaardigd uit roestvrij staal, aluminium of kunststof en daarmee is de E-Vip een corrosie vrij product.

De elektrische componenten zijn volledig geseald en daarmee niet alleen **veilig te gebruiken onder de douche** maar ook te gebruiken in situaties voor **institutionele reiniging**, machinale reiniging en desinfectie van de stoel.

De accu kan worden afgenomen voor **eenvoudig opladen**. Dit is vooral belangrijk wanneer de stoel in de natte ruimte blijft terwijl het laden in een aparte, droge ruimte wordt gedaan. De accu kan echter ook op de stoel blijven tijdens het opladen.

Een volle accu van de Ocean E-VIP is ontworpen voor ten minste 40 cycli van volledig heffen, dalen en heen en weer kantelen. Hiermee is de stoel een **complete werkdag in te zetten zonder opgeladen** te hoeven worden.





# Voordelen van tillen met lussen

Steeds meer klanten kiezen voor Invacare liften. In kortdurende uitleensituaties, WMO pakketten, en ook intramuraal worden de Birdie, de Reliant en de Roze steeds vaker ingezet. Naast deze passieve en actieve verrijdbare liften hebben wij plafondliften in het assortiment. De Invacare liften werken allemaal met lussen. Het gebruik van tilbanden met lussen heeft zeer grote voordelen:

## 1) Eenvoudiger aanbrengen en bevestigen van de band

Het voordeel van een lussenband is dat de bevestiging van de band aan de lift eenvoudiger is. Er is meer ruimte waardoor kleine verschuivingen bij het aanbrengen van de band minder invloed hebben op het eindresultaat. Hiervoor is bijna geen trekkracht nodig.

### Positioneren in de stoel met een lussenband

Voor het positioneren in een stoel is een lift met 2-puntsjuk een goede keuze. Door de selectie van de juiste (standaard) band met lussen is het prima mogelijk om iemand te positioneren in zitstand in de stoel. Hierdoor is een kanteljuk overbodig.

### Een ondersteunde transfer van zittende - naar liggende positie

Op het moment dat iemand naar bed verplaatst wordt, zal als eerste de stuit de ondergrond raken. De beenbanden hebben het werk gedaan. Het ruggedeelte blijft echter steunen tot iemand ligt. Een goed ondersteunde transfer van zit naar lig is met een 2-puntsjuk dus prima mogelijk.

## 2) Meer vrijheid voor de cliënt

De cliënt ervaart het gebruik van een lussenband als prettiger vanwege een grotere afstand van het juk tot het gezicht en onderlichaam. Omdat de meeste cliënten die verplaatst worden met een passieve lift een goede hoofdbalans hebben, geeft onze "universeel standaard" band zichruimte zodat de cliënt om zich heen kan kijken.

## 3) Invacare tilband past meer mensen

Invacare heeft bij de ontwikkeling van banden rekening gehouden met het standaardiseren van maatvoering. Maat M bij Invacare past bij een gewichtrange van de cliënt van 40 kg tot 90 kg. Ook buiten deze gewichtsrage zijn banden leverbaar tot een maximum gebruikersgewicht van 200 kg.

Voor een compleet overzicht van onze banden zie [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl).

**Krapper budget?** *Neem gerust contact met ons op om voor te rekenen wat het u bespaart als u kiest voor tillen met een 2-puntsjuk. U realiseert een Arbo-verantwoorde situatie voor uw medewerkers, een comfortabele situatie voor uw bewoners en meer ruimte in uw budget.*



# Zuurstoftherapie: levering én dienstverlening

Als producent van hulpmiddelen met de focus op kwaliteit, is het voor Invacare van belang met welke distributeurs je contracten afsluit. Immers, een kwalitatief hoogwaardig product wil nog niet zeggen dat je daarmee een tevreden gebruiker hebt. De dienstverlening rondom het product is wellicht nog belangrijker.

In mijn werkzaamheden, het aanreiken van apparatuur aan gebruikers met een tekort aan zuurstof, is dit van groot belang en reikt veel verder dan alleen het afleveren.



*Was getekend, Ruud Pauw*

Indien u vragen heeft n.a.v. deze column, neem dan contact op met Ruud Pauw via 06-50274744 of [rpauw@invacare.com](mailto:rpauw@invacare.com).

Graag wil ik u voorstellen aan één van onze distributeurs, de firma Medidis in Lelystad, met een landelijke dekking voor het beleveren van zuurstofapparatuur in de thuiszorg en ook in de zorginstellingen. Dit bedrijf investeert en innoveert continu en volgt de marktveranderingen op de voet. Eén van de voorbeelden die ik hiertoe wil aandragen is dat zij recentelijk een hoogwaardige wasstraat hebben aangeschaft om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van reiniging en desinfecteren van uitstaande apparatuur volgens de geldende richtlijnen.

Van boven naar onder:  
1. Medidis Lelystad  
2&3. DRS-straat Lelystad  
4. Zuurstofruimte Lelystad

## Wat Medidis nog meer doet, vertelt eigenaar en grondlegger, de heer Rudmer Bosma, zelf.

“Sinds bijna 25 jaar is Medidis actief op de medisch-facilitaire zorgmarkt. De focus ligt op de longen, ofwel ademhalings- en luchtwegaandoeningen. Speerpunten zijn medicinale zuurstof, CPAP/OSAS, aerosol (verneveling) en PEP-therapie. Maar met het benoemen van deze productgroepen zijn we er niet. Rond elk van deze hulpmiddelen is een uitgekend servicemodel gebouwd om onze klanten goed te kunnen bedienen.

Voor sommige patiënten die na hun ontslag uit het ziekenhuis komen is het volgen van een speciale therapie, zoals bijvoorbeeld zuurstoftherapie, nodig. Deze mensen krijgen vervolgens apparatuur en toebehoren thuis geleverd door Medidis. De thuissituatie is natuurlijk compleet anders dan in het ziekenhuis, maar is wel de omgeving waar de patiënt het liefst is. Medisch-facilitaire bedrijven zoals Medidis maken het mogelijk dat dit op een verantwoorde en veilige manier kan gebeuren. Hiermee vervullen we in een belangrijke behoefte.

Feit is dat onze klanten ook behoefte aan specifieke informatie hebben, zeker als het gaat om ziektebeelden rondom longen en ademhaling. Hoewel er natuurlijk heel veel op internet te vinden is, is die informatie lang niet altijd juist of volledig. Hier ligt ook een belangrijke taak voor Medidis: sturing en uitleg geven over de praktische inzetbaarheid. Dus ook duidelijk zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden van bepaalde apparatuur.

Een andere noodzakelijke en belangrijke eigenschap is de wil en de durf om te innoveren. Medidis heeft vanaf dag één aan de wieg gestaan van de introductie van nieuwe producten en concepten in de medisch-facilitaire (thuis)zorg: van zuurstofleveringen in het buitenland (voor mensen die op vakantie gaan bijvoorbeeld) tot dagtarieven voor hulpmiddelenzorg. Die rol willen wij ook in de toekomst blijven spelen, met o.a. Invacare als partner.

Het is ook daarom dat onze keuze voor apparatuur is gevallen op Invacare. Deze samenwerking, die al 4 jaar duurt, laat zien dat Invacare haar naam als betrouwbare partner van goede apparatuur en de ondersteuning hierin, zeker naar verwachting invult.

Als we iets doen moet het goed, geen half werk. Vorig jaar is op de locatie in Lelystad een speciale afdeling gerealiseerd die we de DRS-straat (Decontaminatie en Reconditionering Straat) noemen. Deze speciale tak binnen Medidis zorgt voor het grondig reinigen en ontsmetten van diverse apparaten en verbruiksmaterialen. Zo werken we aan het veilig herinzetten van medische apparatuur.

Rudmer Bosma



”

# Invacare in het land!

In mei was Invacare aanwezig op de Supportbeurs in Utrecht. En ook later dit jaar zijn er diverse gelegenheden om ons te ontmoeten en onze zorgoplossingen te zien en te bespreken. Een overzicht hiervan:



27 en 28 oktober  
Nieuwegein

**Gezond  
en Zeker  
Kennisdagen**



7 november  
Apeldoorn

**Jaarcongres  
Ergotherapie**



6 en 7 november  
Kerkrade

**Decubitus  
OZL**



25 november  
Ede

**MSMS dag**

## Actie - klinische onderbouwing



Invacare heeft informatiemateriaal beschikbaar met daarin klinische onderbouwing van de voordelen van het gebruik van het Invacare Vendlet wentelsysteem en de Invacare Softform matrassen range. Deze boekjes kunt u tijdens de hierboven vermelde beurzen kosteloos ophalen bij de stand van Invacare bij inlevering van onderstaande, compleet ingevulde, coupon.

Naam: .....

Functie: .....

Naam zorginstelling: .....

Adres zorginstelling: .....

Postcode / Plaats zorginstelling: .....

E-mailadres: .....

☐ Hou mij per e-mail op de hoogte van Invacare (product) nieuws