

# TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



## Zithoogtes (framehoogtes) voorzijde: wiel- en vorkcombinaties

### Fork Type




		Seat height in front (FSTF) in mm								⚠ Be aware : ONLY 16.5mm between floor and fork		🔧 Spacer is added to achieve height	
		SH360 / 14" [SJ_1200]	SH385 / 15" [SJ_1210]	SH410 / 16" [SJ_1220]	SH435 / 17" [SJ_1230]	SH460 / 18" [SJ_1240]	SH485 / 19" [SJ_1250]	SH510 / 20" [SJ_1260]	SH510 / 21" [SJ_1270]				
Front wheel size	4" (100 mm) [SJ_7000] [SJ_7020] [SJ_7030] [SJ_7040]	UL1 Ultra Low		S2 ⚠	S4	L3	L2						
	5" (125 mm) [SJ_7055] [SJ_7060] [SJ_7070]		UL2 Ultra Low	S1 ⚠	S3	L2	L1	L3					
	6" (150 mm) [SJ_7080] [SJ_7090] [SJ_7100]				S2	S4	L3	L2					
	7" (180 mm) [SJ_7110]					S3	L2	L1	L3				

In geel:  
Haalbaar  
met Action  
5 voorraad-  
modellen


## Verhouding zithoogte voorzijde ten opzichte van achterzijde (wig)

		Zithoogte voorzijde								
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510	535
Zithoogte achterzijde	360	○	○	○						
	385		○	○	○					
	410			○	○	○				
	435				○	○	○			
	460					○	○	○		
	485						○	○	○	○
	510							○	○	○

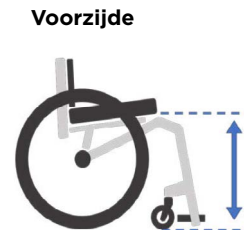

## Zithoogtes achterzijde: bijbehorende wielcombinaties

		Achterwiel in relatie tot zithoogte achter (ZHA)							
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510
Wielmaat	22"	○	○	○	○	○			
	24"	○	○	○	○	○	○	○	
	25"			○	○	○	○	○	○

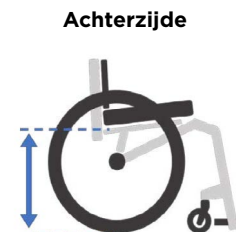


# TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN




## Zithoogtes achterzijde: wielposities

### ZITHOOGTE ACHTER AANPASSEN

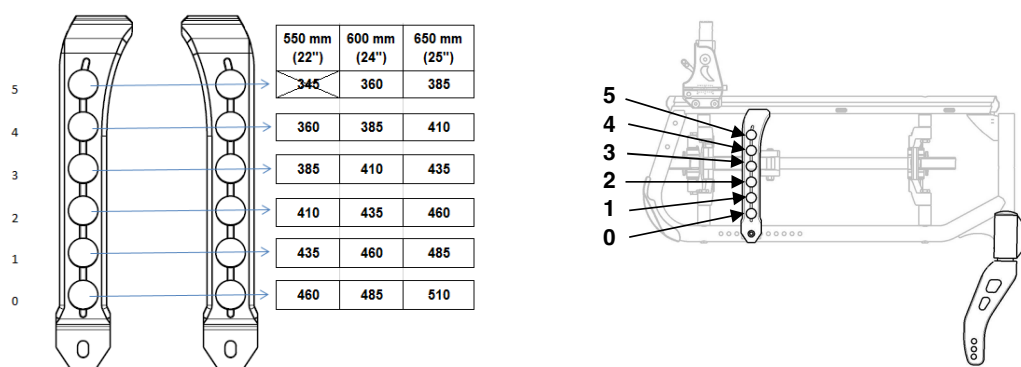


## Mate van actief afstellen aan de hand van asplaatpositie (kantelmoment): van standaard (veilig/passief) tot zeer actief

### REAR WHEELS/FRONT CASTORS

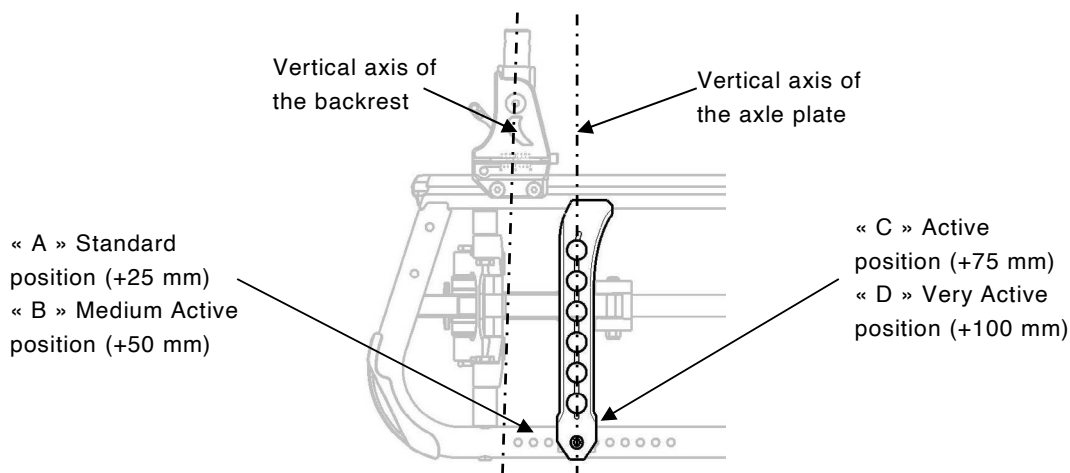

## Kussendiktes (zonder belasting; ter bepaling functionele zithoogte)

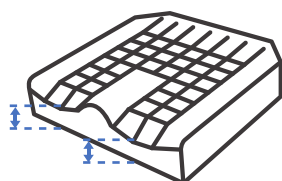

Flo-tech Lite:	6 cm
Flo-tech Contour en Contour Visco:	8 cm
Matrx Libra:	6 cm
Stabilisator:	1,5 cm
Zitkussen belast:	+/- -2 cm

# TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



## Werkinstructie Action 5 voorraadmodellen

Instructie Action 5 voorraadmodel gereed maken voor gebruik


### 1. Zitdiepte instellen



De zitdiepte is instelbaar door de rugbuis naar voren of naar achteren te schuiven.



Het achterste gedeelte van de zitmat schuift daarbij mee.

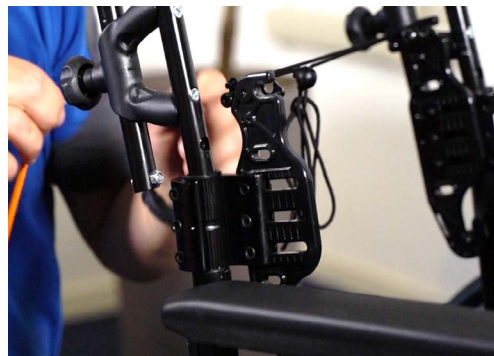

Evt. is de zitdiepte ook instelbaar middels de Matrix bevestiging.

### 2. Functionele zithoogte = framehoogte + dikte belast kussen - inzakking spanbanden (+ optionele stabilisator)






# TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



### 3. Met de stabilisator wordt de functionele zithoogte 1,5 cm hoger.

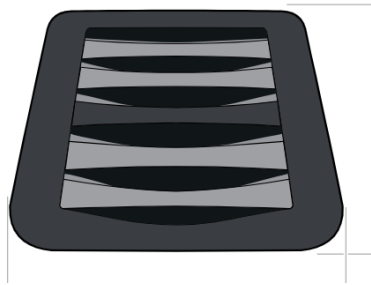

### 4. Instellen achterwielpositie

Af-fabriek wordt de Action 5 geleverd in achterwielpositie Actief (achterwielas 75 mm voor de rug). Afhankelijk van het gebruik kan deze actiever of minder actief worden ingesteld.



### REAR WHEELS/FRONT CASTORS

